ヘムコン デンタル ドレッシング® HemCon® Dental Dressing

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。

[本品はガンマ線滅菌済のディスポーザブル製品であるため。]

2. 再滅菌禁止。

[医療現場での再滅菌を想定していないため。]

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、キトサン及び酢酸を含むパッドから構成される。



※※ 2. 寸法

本品のサイズは下記のとおりである。

(公差: ±10%

- $(1) 10 \text{mm} \times 12 \text{mm}$
- (2) 25mm \times 70mm

3. 原理

本品を出血面(部位)に適応すると、プラス電荷のキトサンにマイナス電荷の赤血球及び血小板が引き寄せられて凝固し、止血される。


【使用目的又は効果】

口腔内止血のために、手術等に使用する。また、一時的に口腔 粘膜組織を保護する。

【使用方法等】

- 1. 滅菌包装を開封し、本品を取り出してください。
- 2. 必要であれば、 本品を出血部位 (面)にあわせて 適当な大きさに 切ってください。



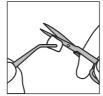





1/1

4. 血餅により止血が得られたら、本品を必ず除去してください。





届出番号:13B1X00066000007

※【使用上の注意】

- ・本品を留置したまま縫合しないこと。
- ・本品使用中に過敏症状が現れた場合には使用を中止し、適切 な治療を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1. 保管方法
- ・室温で保管すること。

※ 2. 有効期間

・包装に表示の使用期限欄を参照のこと。 [自己認証(製造元データ)による]

※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

電話 (03) 3663-2351 (代表)

※※ 製造元

トライコール バイオメディカル Tricol Biomedical, Inc. アメリカ合衆国

発売元

ゼリア商事株式会社

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町 9-7

電話 (03) 3669-3901

RM7154 rev. 5