

医療用品 4 整形用品  
一般医療機器 綿状パッド 32572000

# ヘムコンドット HemCon Dot

## 再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。  
[本品はガンマ線滅菌済のディスポーザブル製品であるため。]
2. 再滅菌禁止。  
[医療現場での再滅菌を想定していないため。]

### 【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造  
本品は、キトサンに酢酸を含ませたパッドである。






2. 寸法  
本品のサイズは下記のとおりである。 (公差：±10%)  
直径 1.9cm
3. 原理  
本品を出血面（穿刺部位等）に適応すると、プラス電荷のキトサンにマイナス電荷の赤血球及び血小板が引き寄せられて凝固し、止血される。

### ※【使用目的又は効果】


透析患者の止血のため、手術等に使用する。

### 【使用方法等】

1. 出血面（穿刺部位等）に少量の血液を残し、本品を直接当ててください。（血液は本品が密着するために必要です。両面どちらでも有効です。）
2. 出血が治まるまで本品を押し当てて圧迫してください。
3. 止血が完了したら、適切な包帯等で保護してください。（本品を濡らさないように気を付けてください。）

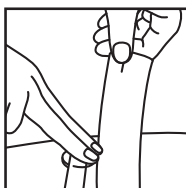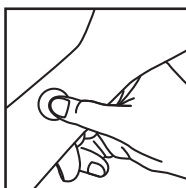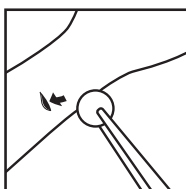

4. 48時間以内に、水や生理食塩水で湿らせながら本品を取り除いてください。

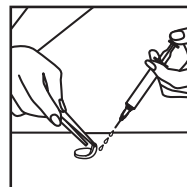

### ※【使用上の注意】

- ・血液透析終了時の止血だけに使用し、体内に埋め込まないこと。
- ・本品使用中に過敏症状が現れた場合には使用を中止し、適切な治療を行うこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法  
・室温で保管すること。
2. 有効期間  
・包装に表示の使用期限欄を参照のこと。  
〔自己認証（製造業者データ）による〕

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元  
ゼリア新薬工業株式会社  
電話 (03) 3663-2351 (代表)

### ※製造元

トライコール バイオメディカル  
Tricol Biomedical, Inc.  
アメリカ合衆国

### 発売元

ゼリア商事株式会社  
〒103-0024  
東京都中央区日本橋小舟町 9-7  
電話 (03) 3669-3901